


THE ONE AND
ONLY WITH

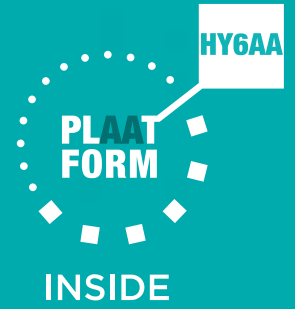


sune
KOS

Body

Dé **Body-Injectable**
tegen **verslachte huid** en
striemen dankzij
opbouw van de **ECM**

Sunekos Body is een injectable bedoeld voor de behandeling van **striemen** en **huidverslapping** van

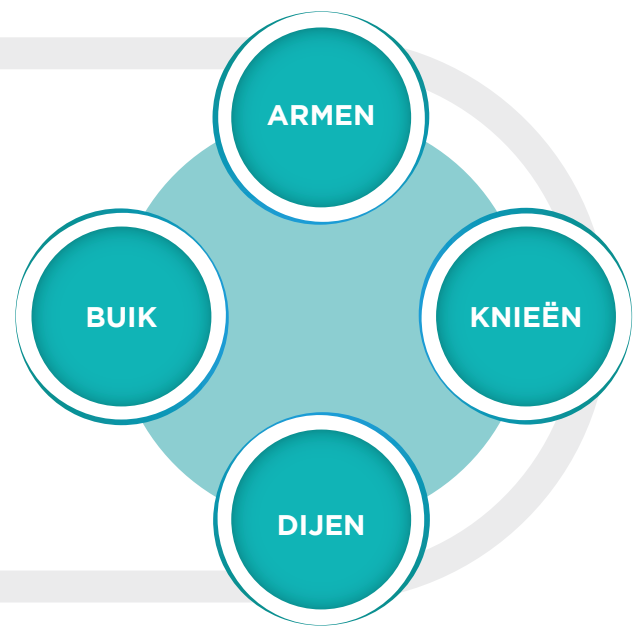

De dermis is verschillend afhankelijk van de regio van het lichaam.




Injectie Techniek




- Naald 27-29G en 12-13mm
- Medium-Diep Dermis injectie
- 30°- 45° teruglopende lineaire injectie
- Serie van bolussen op een afstand van 1,5 cm
- 0.1 - 0.2 ml per bolus
- Injectie in de richting van de stroom (t.o.v. lymfeklieren)
- Massage volgens de stroom



VERSLAPPING VAN DIJEN EN KNEIËN

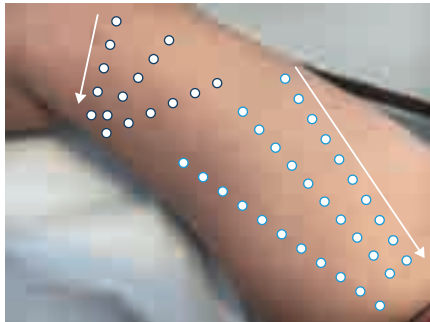

VERSLAPPING VAN ARMEN

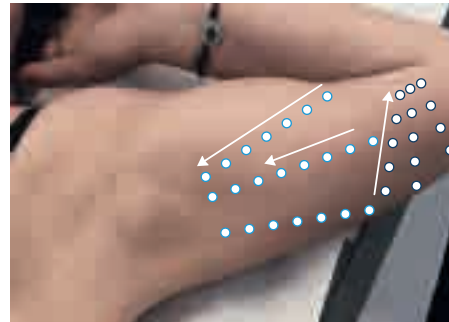

Standaard Protocol

De hoeveelheid product kan gebruikt worden voor:

- één van de specifieke gebieden, in geval van **ernstige situaties** of...
- twee gebieden in geval van **lichte verslapping**

sune
KOS

7 days

3x or 4x

Body

Bij gebruik in combinatie met een laserbehandeling dien je ervoor te zorgen dat er tussen de 2 verschillende behandelingen een periode van 7 dagen zit.


Herhaal elke 6 maanden.

Clinische Evaluatie

21 patiënten werden 4 keer geïnjecteerd, één keer per week met slechts 5 ml op de armen en 5 ml op de benen.

Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd met slechts 1/2 vial per gebied.

RUWHEID VAN DE HUID

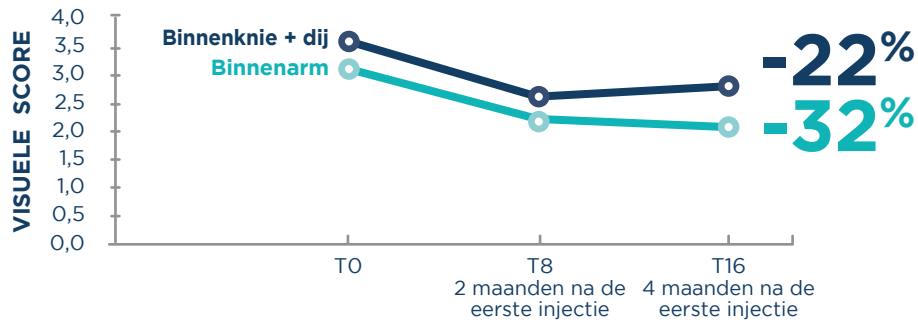

VERSLAPPING VAN DE HUID

Verbetering komt overeen met een vermindering van de visuele score van ten minste 1 niveau.

Binnenarm
-15%

Binnenknie en dij
-23%

Verbetering in niveaus gemeten op fotografische schaal

DICHTHEID VAN DE HUID

(profielmeting)

	T8	T16
Binnenarm		
Rv (Maximale diepte rimpels)	-24.1%*	-17.6%*


* Holm-Sidak Adjusted t test $p < 0.05$ vs T0

Gemeten met Primos compact draagbare (GF Messtechnik) apparatuur.

VOOR



NA

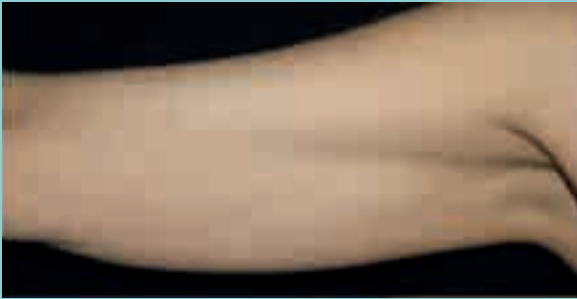

CE 0373

Class III Medical Device

Sunekos Body is samengesteld uit 10 ml van een speciale lage densiteit HA + AA specifiek uitgebalanceerd voor het lichaam.

sunekos.nl



Via Ciro Menotti, 1/A 20129 - Milano - Italy
Tel: +39 02 744020
www.professionaldietetics.com
Email: info@pd-international.com